

NÁVOD K POUŽITÍ: Vytiskněte tuto šablonu na šířku. NEMĚŇTE MĚŘÍTKO. Tiskněte na 100 % nebo deaktivujte měřítko. Vystříhněte podél přerušovaných čar a odstraňte vnitřní část. Vložte nos a tlamu psa do předních a bočních výřezů, abyste zjistili, která maska nejlépe vyhovuje.

AeroDawg 

Aerosolová komora pro psy

MALÁ

STŘEDNÍ

VELKÁ

Šablona pro měření velikosti masky

Každá komora je dodávána se dvěma maskami různých velikostí

Komora **AeroDawg*** SMALL se dodává s malou a střední maskou.

Komora **AeroDawg*** LARGE se dodává se střední a velkou maskou.

How to Use

Vybraná maska by měla zakrývat nos a tlamu. Pokud to však není možné, nasadte masku na nosní dírky psa, zatímco jemně držíte tlamu zavřenou.



Trudell Medical International

www.aerodawg.com



MD-615A-1015 * ochranné známky a registrované ochranné známky Trudell Medical International. © TMI 2015
Všechna práva vyhrazena.