


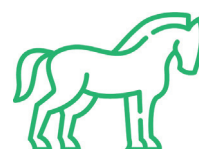

Inhalační masky Trudell

pro psy, kočky a koně



Veterinární ordinace
a kliniky



Vyrobeno
v Kanadě



Snadné
dávkování



Zaměřeno
na dýchací cesty



Speciálně navrženo
pro zvířata

Inhalační masky pro kočky a psy



Aerosolová komora pro psy **AeroDawg** je navržena pro podání léků z inhalátoru s dávkováním (foukátka) psům s chronickou bronchitidou, chronickou rýmou, paralýzou hrtanu nebo tracheálním kolapsem.

Flow-Vu Indikátor inhalace

Indikátor Flow-Vu se pohybuje při vdechování a zajišťuje vizuální confirmaci, že zvíře vdechlo léky. Je to důležité, protože některá zvířata při první zkušenosti s maskou zadržují dech. Indikátor Flow-Vu rovněž umožňuje pečovateli počítat dechy a zajistit správné utěsnění masky.

Aerosolová komora pro kočky

AeroKat je navržena pro podání léků z inhalátoru s dávkováním (foukátka) kočkám s kočičím astmatem, chronickou bronchitidou nebo alergickou rýmou.



Maska

Maska by měla zakrývat čumák a tlamu. Pokud to však není možné, nasadte masku na nozdry mazlíčka, zatímco jemně držíte tlamu zavřenou.

Inhalační ventil

Mimořádně citlivý ventil s nízkým odporem je navržen tak, aby reagoval i na mělké maloobjemové dýchání.

Antistatická komora

Zadržuje medikaci, aby měl mazlíček čas ji vdechnout.


Univerzální zadní díl

Lze použít se všemi typy běžně předepisovaných inhalátorů s dávkováním. (Pozn. není určen pro použití s inhalátory na suchý prášek)



Použití inhalačních léků poskytuje cílené podání léků do plic a snižuje vedlejší účinky pozorované u zvířat léčených systémovými léky. Terapeutického účinku lze často dosáhnout pouze zlomkem dávky potřebné při systémovém podání stejného léčiva.

Dodání léčiva tam, kde je to potřeba.. do plic

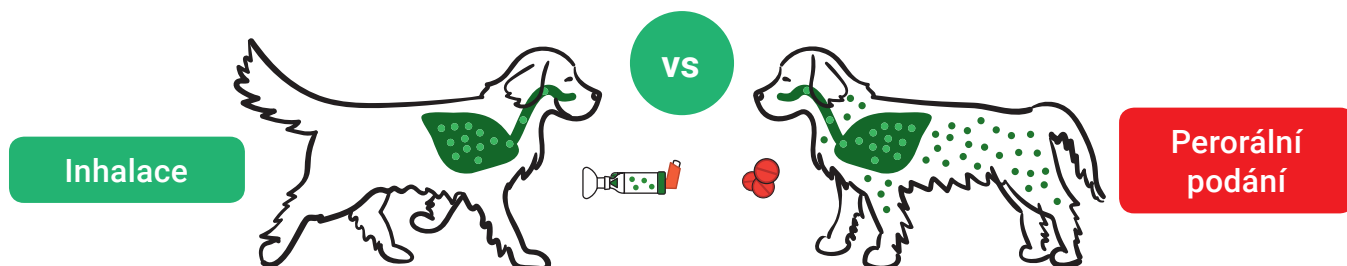

- ✓ bezpečnější z hlediska dlouhodobého řízení onemocnění
- ✓ nezpůsobuje změny zdravotního stavu a chování
- ✓ 25krát nižší koncentrace steroidů při přímém zacílení na dýchací cesty

- ✗ perorální podání je komplikované - menší jistota, že zvíře lék požílo
- ✗ lék se po požití vstřebává i do jiných orgánů, nejen do plic - vyšší riziko vzniku vedlejších účinků

Tipy a triky

- ✓ Odměňte svého mazlíčka před a po ošetření.
- ✓ Zabalte mazlíčka do ručníku nebo deky.
- ✓ Pomalu seznamte mazlíčka s inhalační komorou. Začněte pouze s maskou, aby si na ni zvíře zvyklo.
- ✓ Sledujte indikátor inhalace Flow-Vu, abyste zjistili, že Váš mazlíček své léky inhaloval.
- ✓ Na youtube naleznete mnoho videí.
- ✓ Buďte trpěliví – nevzdávejte se!

*Pomáháme zvířatům
po celém světě snadněji
dýchat*




Skripta ke stažení

Návod k použití

1. Sejměte víčko a protřepte inhalátor.
2. Vložte inhalátor do zadní části komory a jemně přiložte masku na tlamu vašeho mazlíčka.
3. Když se indikátor inhalace Flow-Vu pohybuje směrem k vašemu mazlíčkovi, stisknutím inhalátoru uvolníte lék a držte masku na místě po dobu 5–6 dechů.

POZN.: Masky by měla zakrývat čumák a tlamu mazlíčka, ale ne oči.


1.

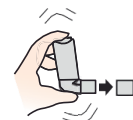


2.



3.

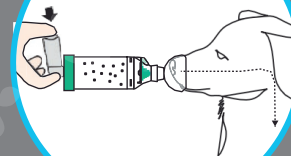

Šablona pro měření velikosti masky

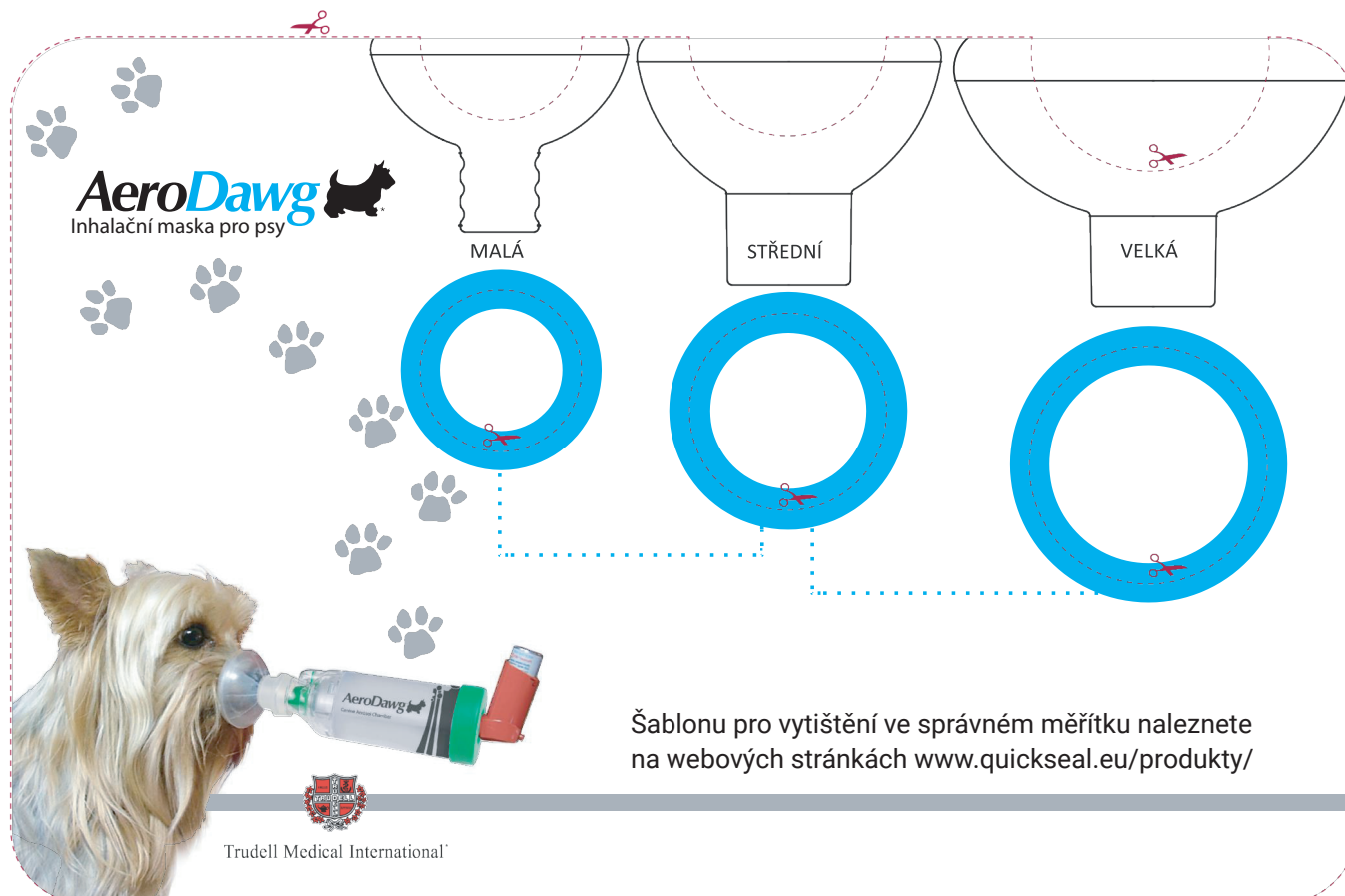

Šablonu pro vtištění ve správném měřítku naleznete na webových stránkách www.quickseal.eu/produkty/

Inhalační masky pro koně



Aerosolová komora **AeroHippus** je určena k podávání léčiv inhalátorem s dávkováním koním s respiračními onemocněními, jako je zánětlivé onemocnění dýchacích cest nebo rekurentní obstrukce dýchacích cest.

Inhalací se lék dostává přímo do plic a tím se snižují vedlejší účinky, které se běžně vyskytují u léčby systémovými léčivy. Terapeutického účinku lze často dosáhnout s pouhým zlomkem dávky potřebné při systémovém podání stejného léčiva.

Flow-Vu

Indikátor inhalace

Indikátor **Flow-Vu** se při nádechu pohybuje směrem ke koni, takže ošetřovatel může koordinovat spuštění dávkovače s nádechem, počítat inhalace a zajistit správné utěsnění masky.



Univerzální velikost

Od hříbat po teplokrevníky.

Vysoká depozice v plicích

Studie radioaktivně značených částic prokázala průměrnou depozici 18,2%. Vysoká depozice může zajistit účinnost medikace i při menším počtu dávek a tím i úsporu nákladů.

Snadno se používá i čistí

Antistatická komora

Zadržuje léčivo, takže kůň má více času na jeho inhalaci.

Univerzální zadní díl

Použitelný se všemi typy běžně předepisovaných inhalátorů s dávkováním.



Veškerá sdělení mají pouze informační charakter, bez záruky správnosti jeho obsahu. QUICKSEAL INTERNATIONAL, s.r.o., neručí za správnost obsahu z důvodu možných tiskových a redakčních chyb. Reklama je určena pro odborníky. Pozorně si přečtěte návod k použití. Použití obrázků a textů není bez předchozího souhlasu dovoleno. Všechna práva vyhrazena. Datum vydání 9/2022 © 2022 QUICKSEAL INTERNATIONAL, s. r. o.



QuickSeal

informace a objednávky:

QUICKSEAL INTERNATIONAL, s. r. o.
Korytná 47, 100 00 Praha 10
info@quickseal.eu

www.quickseal.eu
+420 273 167 580
f quickseal.eu